



Fig 1 (Schouderriem niet op afbeelding)

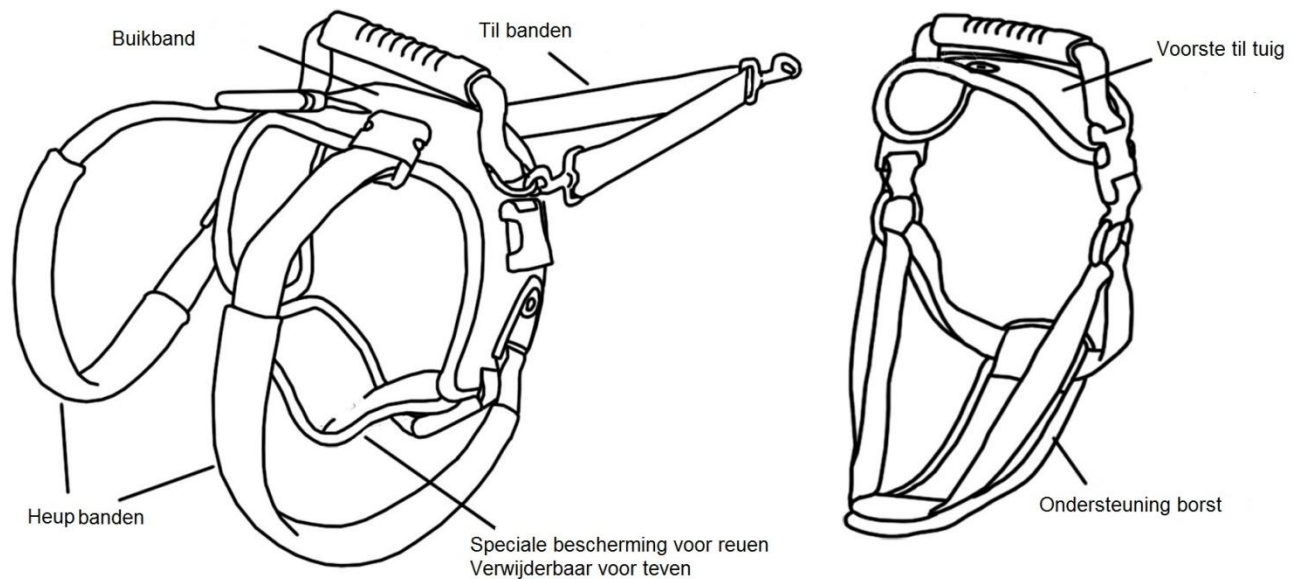

Het achterste gedeelte plaatsen:


Open de plastic kliksluiting aan één kant van de buikband en van allebei de heupbanden. Plaats het achtertuig op de rug van de hond, ca. 5cm voor de staartaanzet. Doe de buikband om de buik en maak hem vast aan de andere kant, leid dan de heupbanden onder de poten door en bevestig deze aan de achterzijde van het tuig. Pas de banden aan en kijk of het tuig vast zit, maar niet te strak.

Voor verbeterde pasvorm hebben de banden een draaibare verbinding aan de voorkant van de band. Deze verbinding kan op verschillende posities op het tuig worden aangebracht, (2 bij medium, 3 bij large). Om deze verbinding te verplaatsen, kijk op onderstaande afbeeldingen en volg de instructies. Schuif de juk aan de heupband los van de pen. Ontvouw dan het pivot gedeelte, zodat het verplaatst kan worden en vouw hem weer dicht en herplaats de juk van de heupband weer over de pen.

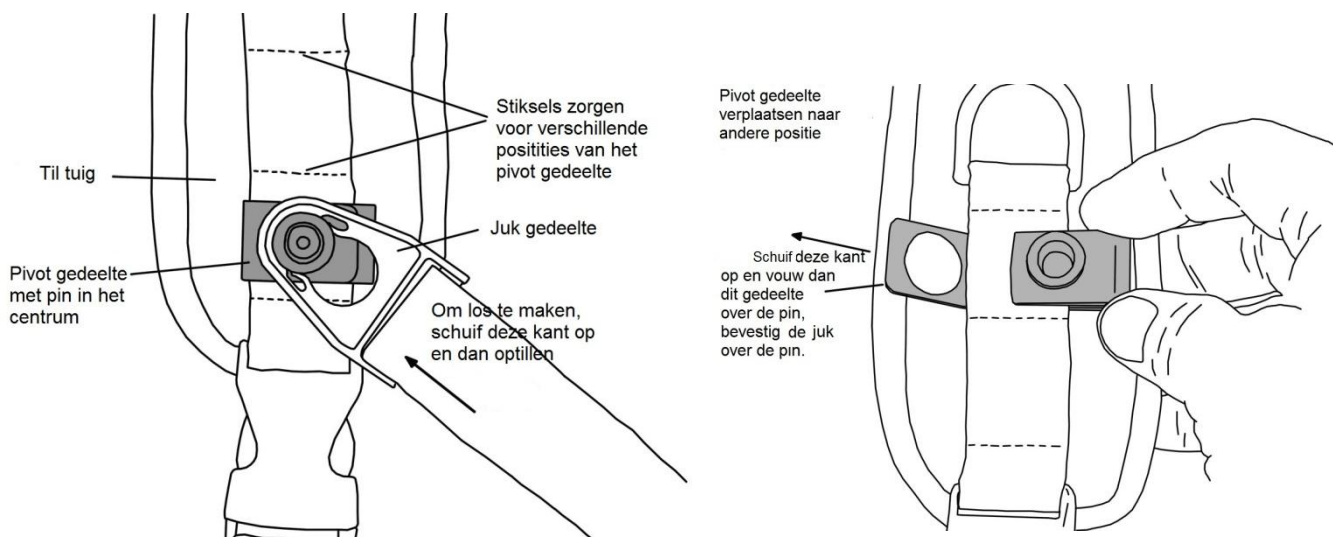

Zodra het achterste gedeelte is geplaatst, kan de hond worden ondersteund doormiddel van de verstelbare riem of rubberen handgreep.

Het unieke design van het tuig zorgt ervoor dat de hond getild wordt aan zowel de heupbanden en de buikband voor een evenwichtige verdeling en vermindering van stress bij de hond. Voor reuen kan de buik band worden verwijderd bij het plassen. Maak de kliksluiting los en bevestig hem aan de extra klik aan de andere kant. De hond kan nog steeds getild worden aan de heupbanden totdat de buikband weer herplaatst is. De buikband is uitgevoerd met een gedeelte dat de edele delen van de reu beschermt en die bij gebruik bij een teef verwijderd of bij het schoonmaken verwijderd kan worden.

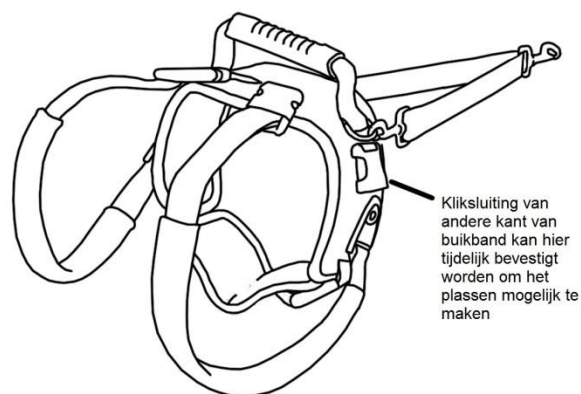


Kliksluiting van andere kant van buikband kan hier tijdelijk bevestigd worden om het plassen mogelijk te maken

Het voorste gedeelte plaatsen:

Open de kliksluiting bij het rubberen handvat, leg het borsttuig op de grond en help dan de hond in te stappen met de poten door de openingen aan beide kanten van het borsttuig. Til de banden aan beide zijden van het borsttuig op en plaats het bovenste tilgedeelte achter de nek van de hond en klik het borstgedeelte weer aan het deel met rubber handvat.

De hond kan nu ondersteund worden met behulp van de tillijn of door gebruik te maken van de rubberen handvatten. Als hij niet gebruikt wordt kan de achterste til lijn vastgemaakt worden aan de D-ring van het voorste tuig. (zie afbeelding) Met het achterste en voorste gedeelte samengevoegd, kan het gehele tuig voor langere tijd blijven zitten, om even snel te kunnen helpen. Dit is niet van toepassing op enkel het achterste gedeelte.

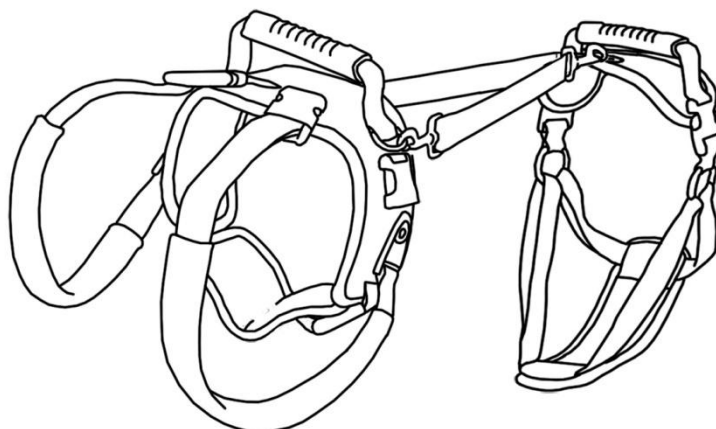

Optioneel:

Voor zwaardere honden of bij het ondersteunen over lange afstanden, adviseren wij u om gebruik te maken van de schouderband. Om deze te bevestigen, maak de tillijn los van het voorste tuig en bevestig de musketonhaak aan het ene einde van de schouderband. Bevestig het andere eind van de schouderband aan de D-ring van het voorste tuig.

Waarschuwing: Om verwondingen te voorkomen wees uitermate voorzichtig als u de hond ondersteunt. Gewichtsverschuiving kan leiden tot balansverstoring. Ken uw grenzen, ondersteun altijd met uw benen en niet met uw rug!

Reinigen: De buikband kan losgemaakt worden en in de wasmachine op lage temperatuur gewassen worden. Verwijder het beschermingsgedeelte voor de reu en was deze apart in water met zeep.

Garantie: Het CareLift™ tuig heeft een garantie van 1 jaar na aanschafdatum op defecten in materialen of fabricage fouten. Een kopie van de originele kassabon is vereist bij garantie zaken.

Solvit Products is dedicated to offering innovative solutions to improve pets' quality of life. Please feel free to contact us with and questions, comments, or warranty issues. Thank you for your purchase!